

## **CRIOGLOBULINE**

Il paziente deve rimanere per almeno 30 minuti prima del prelievo ad una temperatura compresa tra i 20 ed i 25 °C. Subito dopo il campionamento la provetta deve essere consegnata in laboratorio e conservata a 37°C fino alla centrifugazione che a sua volta deve essere eseguita con centrifuga termostata alla temperatura di 35°.

Il siero viene conservato poi in frigorifero ad una temperatura di 4°C. Si controlla la presenza di precipitazione spontanea dopo 4-7 giorni.