LABORATORIO ANALISI CLINICHE INDICAZIONI PER PROVE EMOGENICHE

PROVE EMOGENICHE

Tempo di emorragia

- Trattare con tampone di cotone od ovatta con alcool il lobo di un orecchio.
- Con lancetta incidere il lobo (profondità 4 mm).
- Con carta da filtro assorbire la goccia di sangue ogni 30".
- Determinare il tempo.
- (ripetere la prova due volte e considerare il tempo più lungo).
- (V. N. 1'30" 4')

Prova del laccio

- Su paziente disteso si applica bracciale sfigmomanometro a pressione 10 mm Inferiore alla pressione arteriosa massima.
- Dopo 10 minuti si toglie il bracciale e si osserva dopo qualche minuto l'eventuale Comparsa di manifestazioni emorragiche (petecchie).
- Risposta da + a ++++.

Tempo di coagulazione

- Si prelevano 7 ml di sangue e se ne pone in due provettine da sierologia 1 ml
- Ciascuna e i rimanenti 5 ml in provetta da centrifuga.
- Ogni 30" si inclinano le provette a 37℃ osservand o
- l'inizio della coagulazione (tempo di coagulazione iniziale) e
- il tempo di formazione di un coagulo solido (tempo di coagulazione finale).
- (V. N. T.C. I. 5' 7' T.C.F. 6' 15')

Retrazione del coagulo

 Portare in laboratorio il sangue messo in provetta da centrifuga ed osservare la formazione di un coagulo.